

PEGASUS 简易操作指南

一、 开机

按下仪器正面的电源按钮，打开仪器。

二、 日常操作

1、 用户登录

在登录界面输入用户名和密码。通过“其它访问”切换用户名，输入正确的用户名和密码后点击“登录”。



2、 检查系统状态

确保脱水缸干净；检查是否有过期试剂，如果有请及时更换；检查试剂瓶和石蜡缸的液位是否在“MAX”（最高）和“MIN”（最低）之间。



3、 选择程序

从状态界面两侧的“收藏程序”（红框）列表中选择需要运行的程序。



4、启动程序

将带有标本的脱水篮放入脱水缸中，点击“运行”，输入准确的包埋盒数量。



设置结束时间：**立即开始**-脱水即刻开始，注意观察结束时间；**编辑结束时间**-延迟开始，输入的时间即为设定的时间。再点击“启动”开始运行程序。



5、运行结束

程序完成后按提示立即排放脱水缸，排放完成后打开脱水缸取出脱水篮，并点击“完成”。包埋结束后将脱水篮放入脱水缸中，点击“启动”以开始清洁序。



三、 关机

非必要不用关机，如果因特殊情况如移机，维修等原因需要关机时。关机顺序需要先退出软件，方法是点击右上角 Leica 标识，选择“退出”软件再关闭仪器前端的电源。



四、 清洁和维护

每日	<ul style="list-style-type: none">● 清洁密封圈和盖子● 清洁脱水缸和液位传感器● 检查试剂瓶加注液位● 检查冷凝瓶液位● 检查石蜡加注液位● 清洁触摸屏和顶面● 检查废液盘
每周	<ul style="list-style-type: none">● 清空冷凝瓶● 清洁试剂瓶● 检查试剂瓶接头● 检查蜡缸● 清洁外表面
60-90 天	<ul style="list-style-type: none">● 更换活性炭滤网● 检查脱水缸盖密封圈● 检查石蜡缸盖密封圈